



aesthetic liner®
die transparente Zahnkorrekturschiene



TRAGEANWEISUNG UND UMGANG



Die transparente aesthetic liner[®] Zahnkorrekturschiene ist das ideale Gerät, um eine schonende Zahnstellungskorrektur durchzuführen. Sie ist für leichte bis mittlere Fehlstellungen der Frontzähne indiziert.

VORTEILE:

- Durch das schonende Verfahren wird der Zahn nicht überlastet oder traumatisiert.
- Die Zahnbewegung läuft schmerzfrei bzw. schmerzarm ab.
- Der natürliche biologische Knochenumbau kann ohne Schädigung der Zähne ablaufen.

TRAGEANWEISUNG:

- 1 Möglichst rund um die Uhr tragen.
- 2 Tragezeit der Schienen: jeweils ca. 2 Wochen.
- 3 Nur zum Essen, beim Spielen bestimmter Musikinstrumente, bei Kontaktsportarten und zur Zahnhygiene entfernen.
- 4 Während die Schienen im Mund verweilen, darf nur Wasser und keine anderen Getränke oder Nahrungsmittel verzehrt werden.
- 5 Einmal täglich die Schienen mit einer Reinigungstablette oder mit Zahnbürste und Zahncreme ohne Schleifpartikel reinigen.
- 6 Bei Verlust der Schiene oder anderen Problemen bitte möglichst rasch die Praxis aufsuchen.



MEHR ERFAHREN UNTER:

www.aesthetic-liner.de