

## Gebrauchsanleitung ASR Stripping Tool „EinPatientenSet“ aesthetic liner®

Inhalt: Alukoffer inkl. je 1 Stripping Tool

Gelb: 15 µm Polierer

Weiß: 25 µm

Rot: 40 µm Opener

Grau: 60 µm



**Bei den Stripping Tools handelt es sich um nicht sterilisierte Dentalprodukte, die nur von Fachpersonal angewendet werden dürfen. Sie sind sterilisierbar und können während der Gesamtbehandlung des Patienten benutzt werden. Vor der Sterilisation sind diese im Ultraschallbad gründlich zu reinigen. Wir empfehlen autoklavieren bei 121°C. Die farbigen Silikonringe sind hitzebeständig – bitte nicht entfernen.**

### Einleitung ASR

Die Approximale Schmelzreduktion (ASR) wird z.B. auch Stripping oder Slicen genannt und ist eine Technik zur Schaffung von Platz. Dieser wird oft bei einer Behandlung mit aesthetic liner® gebraucht, um Zähne im frontalen Engstand bewegen zu können. Dafür werden Kontaktpunkte reduziert. Dies ist für die Zahngesundheit unbedenklich.

### Man striipt oder slict in mehreren Sitzungen!

ASR ist mit den richtigen Tools einfach. Wie empfehlen generell, den Schmelz in mehreren Sitzungen abzutragen. Engstände werden möglichst von distal nach mesial aufgelöst. Richtiges ASR sollte auf die Kontaktpunkte ohne starke Engstände beschränkt werden.

### Zuerst müssen alle Kontakte gelöst werden!

Es müssen generell immer alle Kontakte beim ersten Stripping mindestens mit Weiß, ggf. mit Gelb gelöst werden. Es empfiehlt sich, die ASR immer in der absteigenden Reihenfolge durchzuführen: erst Rot oder Grau, dann Weiß, danach Gelb. Am einfachsten ist es mit dem roten Opener zu beginnen. Also immer von grob nach fein. Das ist kontrollierter und patientenfreundlicher.

Spannen Sie das Stripping Tool in einen Edelstahlhalter ein. Führen Sie es in den Zahnzwischenraum ein. Nun wird der Streifen mehrmals hin- und her bewegt und dies für jede Kontaktfläche wiederholt. Achten Sie darauf, dass ein gleichmäßiger Abtrag mesial und distal gewährleistet ist. So gehen Sie bei jeder in der ASR-Empfehlung angegebenen Sitzung vor bis die Gesamtmenge erreicht ist.

Zur Sicherheit prüfen Sie den Spalt mit einer **Messlehre**.

## Wir sagen Ihnen, wieviel Sie strippen müssen!


Das Stripping Tool „EinPatientenSet“, das Sie in der Hand halten, ist durch die Nutzung mit einem Handstück komfortabel zu handhaben. Es enthält vier unterschiedliche Stripping Tools mit einer Blattstärke zwischen 0,10 mm und 0,25 mm, jeweils beidseitig beschichtet.

Gelb: 15 µm Polierer

Weiß: 25 µm

Rot: 40 µm Opener

Grau: 60 µm

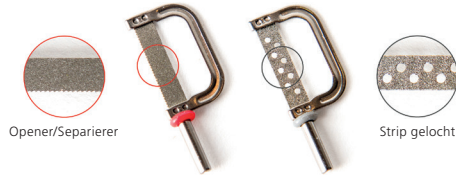

Wieviel reduziert werden muss sehen Sie in unserer ASR-Empfehlung, die Ihren patienten-individuellen Behandlungsunterlagen beiliegt. Dort ist der Gesamtplatzbedarf angegeben und es ist farblich gekennzeichnet in welcher Behandlungsstufe, an welchem Zahn, wieviel gestrippt werden muss. Wichtig ist es, den Anweisungen in der ASR-Empfehlung genau zu folgen, um aesthetic liner® die vorgegebene Bewegung der Zähne optimal zu ermöglichen. Damit haben Sie maximale Sicherheit und optimale Platzverhältnisse.

## Fluoridierung ist wichtig!

Nach der ASR sollten die Zähne fluoridiert werden.

### Zwei wichtige Hinweise

Holen Sie sich immer eine schriftliche Einwilligung des Patienten nach Aufklärung ein. Behandlern, die bisher wenig Erfahrung mit Stripping gemacht haben, raten wir vom Einsatz oszillierender Instrumente ab. Das Risiko einer schlechten Krümmung, zu flacher Kontaktflächen oder zu viel Abtrag ist zu groß.

**Aufbereitungshinweise unter [www.aesthetic-liner.de/#zahnarzt](http://www.aesthetic-liner.de/#zahnarzt) **  
**Anwendung nur durch Fachpersonal, Dentalprodukt – nicht steril**



**Hersteller:** oscident GmbH, Bommersheimer Weg 11A,  
61348 Bad Homburg, Germany, Tel. +49 6172 2663956  
info@oscident.de - [www.oscident.de](http://www.oscident.de)

## Vertrieb durch die aesthetic liner®-Speziallabore:

### Frankfurt am Main

Fachlabor Dr. W. Klee GmbH  
Vilbeler Landstraße 3-5  
60386 Frankfurt, Germany  
Telefon +49 69 94221-0  
Telefax +49 69 94221-201

### Potsdam

Fachlabor Dr. W. Klee GmbH  
Potsdamer Straße 176  
14469 Potsdam, Germany  
Telefon +49 331 55070-0  
Telefax +49 331 55070-21

### Hamburg

Labor Dr. F. W. Selbach GmbH & Co. KG  
Beutnerring 9  
21077 Hamburg, Germany  
Telefon +49 40 761044-0  
Telefax +49 40 7606711

[www.aesthetic-liner.de](http://www.aesthetic-liner.de) – [info@aesthetic-liner.de](mailto:info@aesthetic-liner.de)